

Papacárie Duo

Elimina las caries sin fresar

Una gota de Papacárie colocada sobre la caries, ablanda la lesión y permite despegarla de la dentina sana sin necesidad de usar turbina. **Papacárie sólo actúa sobre la caries, dejando intacta la parte sana***.

En **30 segundos**, sin dolor ni sensibilidad y sin generar ningún tipo de aerosol, puede removerse la caries con una simple cureta. No es preciso el uso de elementos rotatorios ni anestesia.



*"La Papaína actúa solamente en el tejido lesionado debido a la ausencia de una antiprotéasa plasmática, la alfa₁-anti-tripsina, que impide su acción proteolítica en tejidos considerados normales" Papain Gel: A new Chemo-Mechanical Caries Removal Agent. Sandra Kalil et al. Journal of Clinical Pediatric Dent 30(20): 115-120, 2005

Más de 300 artículos científicos publicados

Cómo usar Papacárie

1. Colocar la cantidad de gel (dependiendo del tamaño cavitario) sobre la loseta de vidrio o directamente sobre el guante.

2. Llenar la cavidad con PAPANACÁRIE y dejar que el producto actúe durante **30-60 segundos**.

3. Remover la dentina cariada ablandada con la cureta

(no es necesario una herramienta afilada). En caso de caries de gran tamaño puede realizarse una segunda aplicación hasta comprobar la ausencia de tejido infectado. La superficie debe aparecer brillante.

Cuando no se altera la apariencia del gel significa que no hay más caries en descomposición.

4. Una vez retirada la caries, limpiar la zona y rehabilitar de la forma habitual.

