



Grandio® Core Dual Cure

MATERIAL DE RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES
NANO-HÍBRIDO, FLUIDO Y DE CURADO DUAL



Grandio® Core Dual Cure

LA COMPETENCIA DE GRANDIO® PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES

Grandio Core Dual Cure es el último miembro de la exitosa familia Grandio. El ámbito de indicación cubre la reconstrucción adhesiva de muñones y la fijación de postes radiculares. Grandio Core Dual Cure es el primer producto de la gama de productos de Grandio que también es, adicionalmente a la fotopolimerización, de autocurado. Esta capacidad es el requisito incondicional para el uso en el conducto radicular en donde no es posible fotopolimerizar.

Junto con los adhesivos correspondientes, los dientes con alta pérdida de tejido también pueden ser reconstruidos con composites modernos, mismo en caso de una pérdida completa de la corona clínica.

Los requisitos que se exigen de los materiales utilizados son altos. Tienen que

- adherir eficazmente al tejido duro del diente
- adherir eficazmente a un poste radicular
- mostrar una dureza parecida a la dentina
- comportarse como el diente natural durante cargas
- ser de curado dual para el uso en el conducto radicular
- presentar una alta radiopacidad (365% Al equivalente)

Grandio Core Dual Cure está equipado con la misma nano-tecnología, cuya ya ha sido empleada en Grandio y GrandioSO. Con el uso de las nano-partículas funcionalizadas resulta la alta parte de relleno del 77% que es, entre otros, decisiva para la alta estabilidad y resistencia bucal de Grandio Core Dual Cure. Especialmente en el área del molar juega la aplicación práctica del material de reconstrucción un papel importante: Las cánulas de mezcla con una punta fina doblada y la forma ergonómica de la jeringa QuickMix consideran las cavidades que son de difícil acceso. Un diente que ha podido fresar, también lo puede alcanzar y reconstruir con la jeringa QuickMix. Grandio Core Dual Cure está disponible tanto en los colores “dentina”, “azul” y “blanco” y puede ser utilizado tanto debajo de restauraciones muy translúcidas, como también con alto contraste al tejido duro del diente, por ejemplo en caso de preparaciones subgingivales profundas. Grandio Core Dual Cure: La competencia de Grandio para la reconstrucción adhesiva de muñones.



Alta pérdida de la sustancia en el área de los dientes anteriores después de la excavación



Situación después de la reconstrucción con Grandio Core Dual Cure, lista para la impresión



Restauración definitiva

Fuente: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemania

Presentaciones

- REF 1910 Jeringa QuickMix 10 grs. dentina, accesorios
- REF 1911 Jeringa QuickMix 10 grs. azul, accesorios
- REF 1912 Jeringa QuickMix 10 grs. blanco, accesorios
- REF 2261 Dispenser – QuickMix
- REF 2191 Puntas de mezcla tipo 11 para jeringa QuickMix, 50 u.
- REF 2142 Puntas intrabucales tipo 4 para jeringa QuickMix, 50 u.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Alemania

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140
info@voco.com
www.voco.dental

Distribuidor: